

WESENTLICHE VORTEILE DES COMBIFIX-SCHLAUCH- BEUTELS



Einfache Handhabung

Das Beutelsystem passt perfekt mit dem Irrigationskonus zusammen - eine falsche Bedienung ist somit ausgeschlossen.



Großzügig dimensioniert

Combifix hat eine ausreichende Länge, damit der Schlauchbeutel auch stehend zur Irrigation genutzt werden kann.



hygienisch und sauber

Die geschlossene Beutelausführung sorgt dafür, dass

- keine Spritzer nach außen gelangen
- Ihre Hand nicht mit Ausscheidungen in Berührung kommen
- nur eine sehr geringe Geruchsbelästigung entsteht.



Hochwertig verarbeitet

Die Andruckplatte ist fest mit dem Beutel verschweißt. Machen Sie sich also keine Sorgen über gerissene Anschlüsse oder undichte Verbindungen.

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.schaefers-medizintechnik.de



**BEI UNS ERHALTEN
SIE EINE KOMPETENTE
BERATUNG – RUFEN SIE
AN ODER SCHREIBEN
SIE UNS.**

combifix

KONTAKTDATEN:



Schaefers
Medizintechnik

Postfach 2115
46342 Velen
Telefon: 02863 95024

service@schaefers-medizintechnik.de
www.schaefers-medizintechnik.de


combifix

COMBIFIX EIN BESONDERER SCHLAUCHBEUTEL

Stand 2023-02-27

SAUBER, SICHER, WOHLFÜHLEN


COMBIFIX SCHLAUCHBEUTEL FÜR DIE IRRIGATION

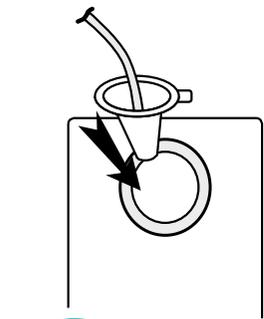

1

KONUS ANBRINGEN


Den Konus in den Schnapping einrasten

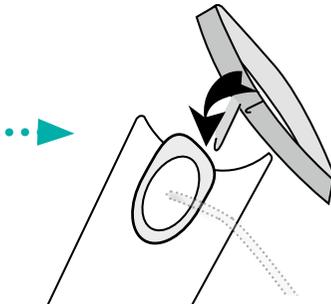

2

GÜRTEL ANKLIPSEN


Den Gürtel rechts und links einrasten

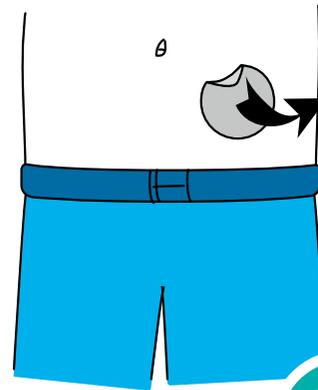

3

STOMA ÖFFNEN

Alte Versorgung vom Stoma entfernen

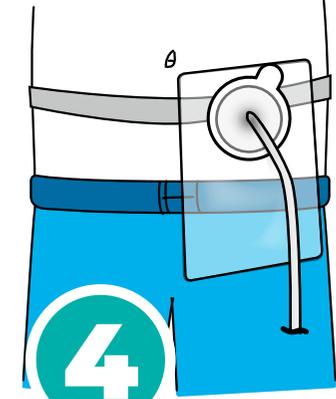


4

BEUTEL ANLEGEN

Beutel über das Stoma an die Bauchdecke anlegen

BEUTEL SCHLIESSEN

Nach erfolgreichem Wassereinlauf den Konus entfernen und den Verschlussdeckel auf die Öffnung drücken und einrasten. Abschließend Beutel hochklappen und mit der Klammer verschließen.

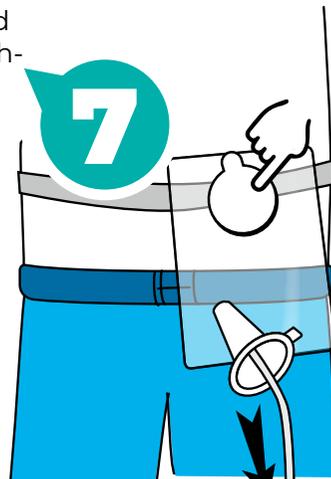


7

ENTSORGEN

Nach der Irrigation den Beutel im Restmüll entsorgen.


8

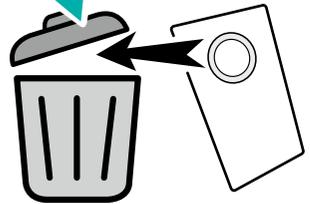

6

IRRIGIEREN

Irrimed einschalten und Wasser ins Stoma laufen lassen (irrigieren).

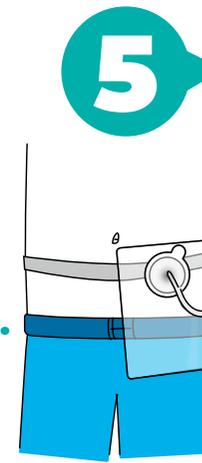

5

VERBINDUNG ZUM IRRIMED

Überleitungsschlauch an das Irrimed anschließen und Konus in das Stoma einführen.