

WIE WENDEN SIE IRRIMED AN?

Die Anwendung ist sehr einfach, da sie mit dem weithin bekannten Reinigungseinlauf vergleichbar ist.

Füllen Sie angenehm temperiertes Leitungswasser in Ihr irrimed. Es wird dann, von einer Kreiselpumpe getrieben, mittels Überleitungsschlauch und Konus in das Stoma eingeleitet.

Hierdurch wird ein Dehnungsreiz gesetzt, der wiederum die Peristaltik und damit die Darmentleerung aktiviert.

In der Folge wird eine Entleerung des Dickdarmes erreicht, so dass Sie stuhlgangfreie Zeiten von 24 bis 48 Stunden und mehr erreichen können.

Die genaue Beschreibung der Anwendung finden Sie in der Gebrauchsanweisung unter:

www.schaefers-medizintechnik.de



UNSER SERVICEVERSPRECHEN

- **Kompetente Beratung**
- **Reparaturen in weniger als einer Woche**
- **Kostenloses Ersatzgerät**

Bestelldaten:

irrimed stoma
Best. - Nr.: 4000
PZN: 093 396 608

irrimed stoma ist mit allem erforderlichem Zubehör im Fachhandel zu erhalten oder für Selbstzahler direkt bei uns.

Irrimed stoma ist im Hilfsmittelverzeichnis der gesetzlichen Krankenkassen unter der Nummer 29.26.08.1005 gelistet und kann somit per Rezept verordnet werden.

irrimed classic

EIN PRODUKT DER:



Schaefers
Medizintechnik GmbH

Im Wiesengrund 13
46342 Velen
Telefon: 02863 95024

service@schaefers-medizintechnik.de
www.schaefers-medizintechnik.de

irrimed classic

**STOMA OHNE
BEUTEL...
DIE LÖSUNG:
IRRIMED**



Stand 2024-02-06

SAUBER, SICHER, WOHLFÜHLEN

IRRIGATION MIT IRRIMED

WAS IST ÜBERHAUPT IRRIGATION?

Die Irrigation ist die beste und effizienteste Methode, um bei einem Colostoma wieder eine kontrollierte Darmentleerung zurückzugewinnen und stuhlgangfreie Zeiten von 24 bis 48 Stunden und mehr zu erreichen.

Irrimed verhindert klassische Probleme der Beutelversorgung, wie

...Geräuschbelästigung

...unangenehmer Geruch

...Hautreizungen durch Ausscheidungen

...Entsorgungsprobleme des Beutels u. v. m.

Stattdessen wird das Stoma lediglich diskret mit einer Stomakappe abgedeckt.

irrimed gibt Ihnen mehr Sicherheit und höheren Tragekomfort. So können Sie Ihr privates und soziales Umfeld wieder genießen. Zudem entlasten Sie die Umwelt durch weniger Ressourcenverbrauch.



UNABHÄNGIG

irrimed stoma kann dank seines modernen und leistungsfähigen Li-Ionen Akkus unabhängig vom Stromnetz überall eingesetzt werden.

KOMFORTABEL

Die Wassertemperatur lesen Sie deutlich über eine große LCD Anzeige sehr einfach ab.

KOMPAKT

Für Reisen kann der Griff platzsparend und einfach herausgeschoben werden.

MOBIL

Dank seines ergonomisch optimalen Wasserbehälters mit separatem Griff tragen Sie den gefüllten irrigimed bequem und mit wenig Kraft wohin Sie möchten.

SICHER

Mit dem weltweit einsetzbaren Schnelllader laden Sie den Akku in max. 8 h wieder vollständig auf.