

**Die rektale Irrigation sollte nicht durchgeführt werden bei:**

- Unverträglichkeiten gegen einen der in dem Produkt verwandten Werkstoffen
- Stenosen des Dickdarms
- Stenosen des Analkanals
- Höhergradiges Hämorrhoidalalleiden
- Chronisch entzündliche Darmerkrankungen
- Entzündliche Veränderungen des Analkanals (z.B. Abszesse)
- Schmerzhaft Veränderungen des Analkanals (z.B. Fissuren)

Artikel	Bestelldaten
Kombinationsvorschlag 1 (Rektalkathetersystem)	REF: 5011
Kombinationsvorschlag 2 (Rektalkathetersystem mit verschiebbarem Konus)	REF: 5012
Ersatzkonus rektal, verschiebbar	REF: 5006 PZN: 19113617
Darmrohr CH20	REF: 5007 PZN: 725677
Stufenkegeladapter	REF 5008 PZN: 17366337
Medizinisches Gleitgel Optilube	REF: 5009 PZN: 14189231

Inhalt einer Verpackungseinheit:

REF 5011:  
20 Darmrohre, CH 20,  
20 Packungen medizinische Gleitgel Optilube  
5 Stufenkegeladapter

REF 5012:  
20 Darmrohre, CH 20,  
20 Packungen medizinische Gleitgel Optilube  
5 Stufenkegeladapter  
5 Konen rektal, verschiebbar

	Bestellnummer
	Chargenbezeichnung
	Hersteller
	Gebrauchsanweisung beachten
	Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
	Nicht zur Wiederverwendung
	Vor Nässe schützen
	Medizinprodukt
	Produkt nicht sterilisieren

✂-----

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

damit sichergestellt ist, dass Sie immer einwandfreie Ware erhalten, wird unsere Fertigung sorgfältig überwacht. Sollte es dennoch einen Grund zur Beanstandung geben, schicken Sie uns bitte die Komponenten des Rektalkathetersets mit diesem Kontrollabschnitt zurück, damit wir der Ursache des Fehlers nachgehen können. Wir liefern Ihnen selbstverständlich kostenlosen Ersatz.

Notieren Sie im Feld unten bitte die LOT Nummer des Verpackungsetikettes.

REF 5011 / 5012 LOT:

  
Schaefers Medizintechnik GmbH  
Im Wiesengrund 13  
46342 Velen  
Tel.: 02863 / 95024  
www.schaefers-medizintechnik.de  
info@schaefers-medizintechnik.de

Stand 2024-01-02

## Rektalkathetersystem

Gebrauchsanweisung für eine Kombination

für die Komponenten

- Darmrohr (REF 5007)
- Stufenkegeladapter mit Luer-Lock-Verbindung (REF 5008)
- verschiebbarem Konus (REF 5006)
- medizinischem Gleitgel (REF 5009).

zum Anschluss an ein Irrigationssystem zur Darmspülung zur Enddarmreinigung.

Zum Einmalgebrauch



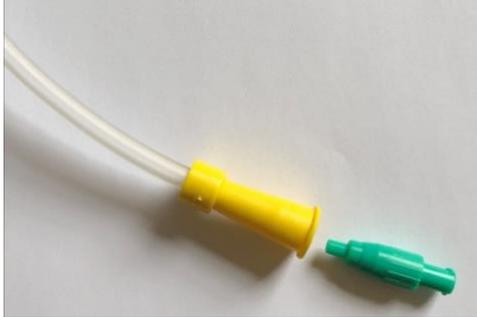


Abbildung 1



Abbildung 2

1.

Beachten Sie bitte die Gebrauchsanleitung Ihres Irrigationssystems und verwenden sie es nach Angaben des Herstellers bzw. Ihres Stomatherapeuten oder Arztes. Die Irrigation an sich wird in der bekannten Weise durchgeführt. Im Nachfolgenden wird nur die Handhabung des Rektalkathetersystems beschrieben.

2.

Stecken Sie den grünen Stufenkegeladapter (REF 5008) fest in den gelben Trichter des Darmrohrs (REF 5007) (Abb. 1).

3. (nur REF 5012)

Schieben Sie den Konus entsprechende Abb. 2 auf das Darmrohr auf.

4.

Schließen Sie das so vorbereitete Darmrohr mittels des Luer-Lock-Anschlusses des Stufenkegeladapters durch Drehen an den Überleitungsschlauch (= Spülschlauch) Ihres Irrigationssystems an.

Wir empfehlen für die im Folgenden beschriebene rektale Irrigation Einmalhandschuhe anzuziehen.

5.

Zur leichteren Einführung tragen Sie das medizinische Gleitgel auf das Darmrohr auf. Führen Sie das Darmrohr (mit dem verschiebbaren Konus) von vorne zwischen den Beinen durch oder von hinten (vom Rücken her) an den After.

6.

Führen Sie das Darmrohr in den After ein und schieben Sie den Konus mit leichtem Druck an den After, so dass der After leicht verschlossen ist.

7.

Beginnen Sie mit der Irrigation. Bei den ersten Anwendungen sollten Sie einen niedrigen Druck zum Spülen wählen.

8.

Lassen Sie so viel Flüssigkeit (nach Angaben Ihres Arztes oder Stomatherapeuten) in den Enddarm laufen, bis ein leicht unangenehmer Druck entsteht. Bewegen Sie den Rektalkatheter leicht auf und ab. Beenden Sie die Irrigation, damit die Flüssigkeitszufuhr beendet wird.

9.

Halten Sie jedoch den After noch etwa 10-15 Sekunden mit dem Konus verschlossen.

10.

Dann entfernen Sie erst den Konus und versuchen den Darm kräftig auszupressen.

11.

Wiederholen Sie den Vorgang, bis sich kein Stuhlgang mehr entleert. Ist die Ausscheidung beendet, geben Sie das Darmrohr mit Stufenkegeladapter und den verschiebbaren Konus in den Restmüll.

*Änderungen aufgrund neuer medizinischer Kenntnisse sind vorbehalten.*

Wenn Sie Fragen zur Anwendung des Systems haben, sprechen Sie mit uns. Wir beraten Sie gerne und individuell.

#### **Anwendungshinweise:**

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise vor Anwendung der Komponenten des Rektalkathetersystems:

Die rektale Irrigation sollte nur nach ärztlicher oder pflegerischer Anleitung (einschließlich auch notwendiger hygienischer Maßnahmen) durchgeführt werden.

Vor der erstmaligen Durchführung der rektalen Irrigation sollte eine ärztliche Untersuchung erfolgen, um Kontraindikationen auszuschließen.

Eine Wiederverwendung von Einmalprodukten kann zu verminderter Leistung oder zum Verlust ihrer Funktionsfähigkeit führen. Durch eine Wiederverwendung von Einmalprodukten kann es zur Exposition mit Krankheitserregern wie Viren, Bakterien, Pilzen oder Prionen kommen. Dieses Produkt darf weder gereinigt, desinfiziert noch sterilisiert werden.